



## Avantajlar

---

### Ürün

Incidin®, bir daldırma banyosunda özellikle düşük kullanım konsantrasyonlarıyla çok çeşitli kullanım alanlarına sahip özel aldehit içerikli etken madde bileşiminden oluşan bir dezenfeksiyon ve temizlik sıvısıdır.

---

### Ruhsat

- ECOLAB tıbbi ürünü, 93/42/EEC CE 0297 uyarınca sınıf IIa
  - Biyosit ürün olarak bildirilmiştir
- 

### Avantajlar

- Formaldehit içermeyen konsantre dezenfektan
- Düşük kullanım konsantrasyonunda bile yüksek dezenfeksiyon güvenliği ve daldırma banyosunda düşük maruz kalma süresi
- Bakteri, maya ve virüslere karşı geniş kullanım alanı
- Kapsamlı malzeme uyumluluğu
- Ek doz ünitesi DG1 ile kolay doz ayarı
- Daldırma banyolarında düşük kullanım konsantrasyonları sayesinde yüksek verim
- VAH\* listesinde yer alır ve virüs öldürücüdür

\* Uygulamalı Hijyen Derneği (VAH)

---

### Uygulama talimatları

- Biyositleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
- Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, kimyasal koruyucu giysiler vs. için Dräger'in Kullanım Talimatlarına ve ayrıca üreticinin uygulama talimatlarına harfiyen uyun!

## İlgili Ürünler

D-88827-2013



### Sekusept® Cleaner Sıvı Temizlik Maddesi

Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanları, dalış cihazları ve kimyasal koruyucu giysilerin dezenfeksiyon işleminden önce manuel temizlenmesi için kullanılan bir konsantre sıvı temizlik maddesidir.

D-4073-2014



### İş kıyafetlerinin temizlenmesi

İş kıyafetleri sıklıkla zorlu koşullara maruz kalır. Bir sonraki kullanıma hazır olmaları için kıyafetler doğru maddelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

D-3957-2014



### Test cihazları ve yüzeylerin temizlenmesi

Hijyenik ve temiz: Her tür yüzeyde kullanılabilen özel temizlik maddeleri ve dezenfektanlarla steril çalışma ortamları sağlanır.

ST-7476-2008



### Kişisel hijyen

Bakterilere karşı sert – ama cildinize nazik. Nazik temizleme, dezenfeksiyon ve bakım ürünleri, sık kullanılsa bile cildi korur.

## Teknik Veriler

### DOZAJ

	Verimlilik (%)	Konsantrasyon (ml/L)	Maruz kalma süresi (dak.)
EN 14561/EN 14562 uyarınca (bakteri/maya öldürücü) solunum koruma cihazları ve solunum koruma ekipmanlarının daldırma banyolarında dezenfeksiyonu	1,5	15	15

### DOZAJ TABLOSU - SIVI

Litre	Kullanım konsantrasyonu %1,5
1 litre	15 ml
2 litre	30 ml
3 litre	45 ml
4 litre	60 ml
5 litre	75 ml
8 litre	120 ml
10 litre	150 ml
20 litre	300 ml
30 litre	450 ml

#### Uygulama talimatları:

Örnek: 10 litre = %1,5 uygulama çözeltisi = 150 ml dezenfektan + 9,85 litre su.

Konsantre dezenfektanı su hacmine göre ekleyin, kısa süre karıştırın. Çözelti hemen kullanılabilir. RKI'nın\* dezenfektan çözeltilerine yönelik tavsiyelerine göre her iş günü değiştirin. Kullanılmamış bir dezenfektan çözeltisinin ömrü en fazla 14 gündür. Çözeltiyi temiz ve kapalı kaplarda saklayın (evye veya depolama kapları).

\* Robert Koch Enstitüsü, Berlin, Almanya

## Sipariş Bilgileri

Incidin® Rapid	Manuel doz sistemli 1 x 2 l şişe	R 62 804
Incidin® Rapid	Manuel doz sistemli 3 x 2 l şişe	R 62 217
Incidin® Rapid	6 litrelik kutu	R 61 880
Doz ünitesi DG1		65 70 187

### AKSESUARLAR

Doz ünitesi DG1	Sulu dezenfektan çözeltilerinde hassas hazırlık için mikroşlemci kontrollü doz ünitesi	65 70 187
-----------------	--	-----------

Tıbbi ürünlerin temizlenmesi için ECOLAB'dan ayrıca ürün bilgisi istenebilir.

Üretici: INCIDIN®, ECOLAB'ın tescilli ticari markasıdır.

## Notlar

## Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TÜRKİYE**  
Dräger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.  
Konrad Adenauer Cad.  
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya  
06550 Ankara, Türkiye  
Tel +90 312 491 0666  
Faks +90 312 490 1314  
[info.draegersafetyturk@draeger.com](mailto:info.draegersafetyturk@draeger.com)

**Bölgesel Satış Temsilcinizi**  
bulun: [www.draeger.com/iletisim](http://www.draeger.com/iletisim)

